


## PŘÍSTROJ NA DETEKCI ALKOHOLU V DECHU S ČASOVAČEM A KAPESNÍ SVÍTLILNOU GH2120

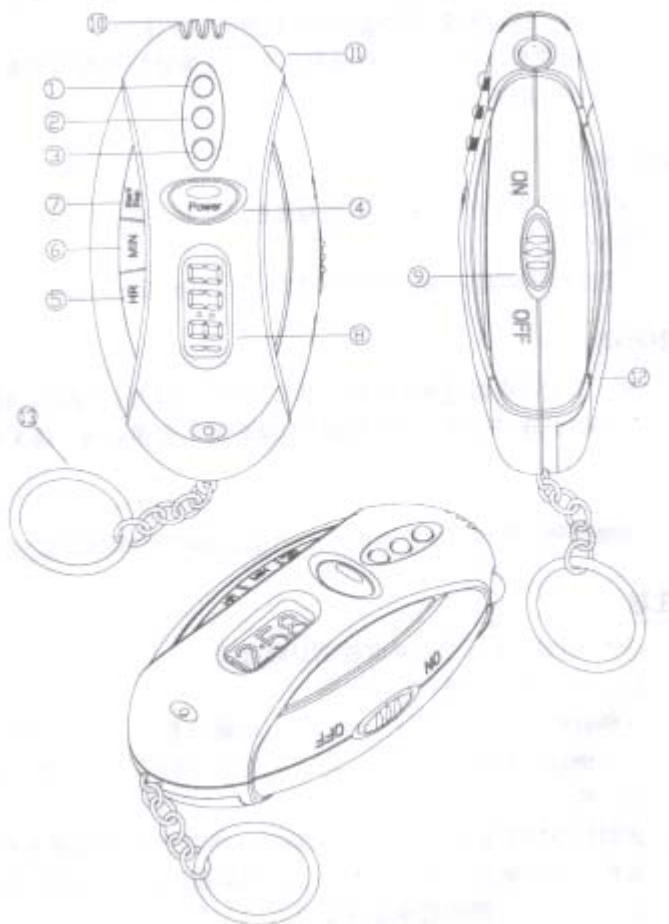

- 1.) Červená LED dioda
- 2.) Žlutá LED dioda
- 3.) Zelená LED dioda
- 4.) Vypínač
- 5.) Tlačítko HR (hodiny)
- 6.) Tlačítko MIN (minuty)
- 7.) Tlačítko Start/Stop

- 8.) LCD displej časovače
- 9.) Vypínač svítilny
- 10.) Náustek
- 11.) LED svítilny
- 12.) Kryt baterií
- 13.) Klíčenka

### VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

1. Tříkrokový test na alkohol
2. Rychlá odezva
3. Kapesní svítilna
4. Klíčenka
5. Časovač pro odpočítávání/Stopky
6. Použití na 2 baterie 1.5V AAA/UM4

## **VLOŽENÍ A VÝMĚNA BATERIÍ**

1. Sejměte kryt baterií na zadní straně přístroje
2. Vložte dvě AAA /UM4 baterie (nejsou součástí balení). Dbejte na dodržení správné polariry.
3. Vraťte kryt baterií zpět na místo.
4. Svítí-li LED diody slabě, vyměňte baterie.

## **TEST NA ALKOHOL**

1. Stiskněte a podržte vypínač, žlutá a červená dioda se rozsvítí.
2. Během asi 10ti sekund začne místo červené a žluté blikat zelená. Přístroj je připraven k použití.
3. Počkejte 5 vteřin a pak vydechněte do náustku. Odečtěte hodnoty z přístroje podle následující tabulky

## **NAMĚŘENÉ HODNOTY**

- \* Svítí zelená LED : Bezpečí → pod 0.02% BAC (nebo 0,1 mg/l BRAC, nebo 0,2 promile)
- \* Svítí žlutá LED: Pozor : → od 0,02% BAC (nebo 0,1 mg/l BRAC, nebo 0,2 promile) do 0,05%BAC (nebo 0,25mg/l BRAC, nebo 0,5 promile)
- \* Svítí červená a žlutá LED : Nebezpečí → přes 0,05%BAC (nebo 0,25mg/l BRAC, nebo 0,5 promile)

BAC → Blood Alcohol Concetration - Koncentrace alkoholu v krvi.  
Zaokrouhlená na jedno desetinné místo odpovídá našim promile  
(Tedy 0,05%BAC = 0,5 promile)

BRAC → Breath Alkohol concentration – Koncentrace alkoholu v dechu. Ta je zjednodušeně řečeno poloviční než naše promile. (Tedy 0,25mg/l BRAC = 0,5 promile)

## **POZNÁMKA**

1. Ujistěte se že v průběhu testu držíte vypínač.
2. Pro získání přesných výsledků by se hladina alkoholu měla měřit nejdříve půl hodiny po konzumaci alkoholu.
3. Jsou-li baterie téměř vybité, červená a žlutá LED dioda svítí i v průběhu testu.
4. Pokud je přístroj delší dobu v nečinnosti, nemusí fungovat okamžitě., Proto několikrát opakovaně stiskněte vypínač.
5. V průběhu testu nepoužívejte vestavěnou svítilnu.

## **FUNKCE SVÍTILNY**

Přepněte vypínač svítilny do polohy ON (Zapnuto). Test na alkohol neprovádějte se zapnutou svítilnou.

## **STOPKY**

1. Stiskněte tlačítko START/STOP pro spuštění stopek.
2. Znovu stiskněte tlačítko START/STOP pro zastavení stopek.
3. Opakovaným stiskem START/STOP pozastavíte a znovu spustíte stopky.
4. Pro vynulování stopek stiskněte zároveň tlačítka HR a MIN.

## **ČASOVAČ**

1. Stiskněte tlačítko HR a MIN pro nastavení hodin a minut odpočtu
2. Stiskněte tlačítko START/STOP pro spuštění odpočítávání.
3. Znovu stiskněte tlačítko START/STOP pro zastavení odpočítávání.
4. Opakovaným stiskem START/STOP pozastavíte a znovu spustíte odpočítávání.
5. V posledních 5ti a 10ti minutách de ozve varovný signál po dobu 2s
6. Dosažení nuly přístroj signalizuje 60 sekund dlouhým zvukem. Pro předčasné ukončení signálu stiskněte zároveň tlačítko HR a MIN.
7. Pro vynulování časovače stiskněte zároveň tlačítka HR a MIN.


## **ODVOLÁNÍ**

Hladiny alkoholu změřené tímto zařízením jsou pouze orientační. Výrobce odmítá zodpovědnost za jakékoli škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:  
**Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno**  
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.

 549 245 575; 602 766 759