

Návod k použití

Zdravotní antidekubitní matrace SB-100

Důležitá poznámka

Děkujeme Vám za zakoupení DOLPHIN tlakově- vzduchové matrace. Před použitím produktu prosím pečlivě pročtěte tento návod. Mějte vždy tento návod po ruce pro pozdější použití. K dokončení platnosti záruky prosím do 14 dnů od zakoupení výrobku, od té chvíle bude záruka platná. Užívejte si a zůstaňte zdraví se sérií DOLPHIN

Preventivní opatření

Aby jste předešli nehodě :

- Zapojujte pumpu jen do řádně uzemněné zásuvky
- Vždy odpojte pumpu ihned po tom co ji přestanete používat
- Umíst'ujte pumpu tak, aby se nedostala do kontaktu s vodou
- Vyvarujte se doteku s pumpou, jestliže přišla do kontaktu s vodou, v takovém případě ihned pumpu vytáhněte ze zásuvky

K předejití osobnímu zranění nebo ohni :

- Pumpu by jste neměli nechávat bez dohledu, dokud je zapojená v zásuvce
- Stálý dohled je nezbytný, když je Vaše pumpa užívána v blízkosti dětí nebo invalidů
- Používejte pumpu pouze účel a možnosti, které jsou popsány v tomto manuálu
- Nikdy nepoužívejte pumpu jestliže má poškozený kabel nebo zásuvku, jestliže je poškozená, spadla do vody nebo nefunguje správně. Vraťte pumpu našim lidem pro kvalifikovaný servis, který zjistí a opraví příčinu problému
- Držte přívodní kabel dál od rozehřátých povrchů
- Neumíst'ujte pumpu tak, aby přívodní kabel nebo trubky přivádějící vzduch svým umístěním představovali riziko pro osobu která přístroj užívá
- Při vytahování ze zásuvky ve zdi netahejte za kabel, ale tahejte za tělo zástrčky
- Nikdy neblokujte vzduchový filtr(umístění naleznete na obrázku identifikace komponentů) Vaší pumpy. Nikdy pumpu nepokládejte na měkké povrchy, jako je postel nebo gauč , kde by vzduchový filtr mohl být zablokován. Vzduchový filtr pravidelně zbavujte nečistot, vlasů apod.

Identifikace komponentů



Předběžné nastavení

Poznámka : Vaše DOPLHIN vzduchově tlaková matrace je vybavena matrací navrženou speciálně pro naši pumpu. Užívání jiných matrací než jsou součástí našeho balení se nedoporučuje a může vyústit v neočekávané operace.

1. Umístěte matraci na postel. Všimněte si směřování matrace, nápis DOLPHIN by měl být na hlavové části postele
2. Zkontrolujte a ujistěte se, že všechny části jsou dobře zapojeny a ve správném pořadí
3. Nastavte vypínač do polohy OFF
4. Nejdříve zapojte přívodní kabel do zástrčky na pumpě. Poté zapojte přívodní kabel do zásuvky ve zdi, která bude splňovat parametry požadovaného napětí (informace naleznete na zadní straně Vaší pumpy).
5. Připojte vzduchovou hadici k pumpě tlačím hadice pevně do vývodů vzduchu umístěných na straně pumpy
6. Umístěte pumpu na pevný povrch a nebo použijte přiložené háky k zavěšení
7. Udržujte místo kam dáváte pumpu čisté. Prach, nečistoty, vlasy a jiné mohou ucpat vzduchový filtr
8. Umístěte vzduchovou hadici tak, aby nebyla zauzlovaná ani přiskřípnutá

Začátek operace

Pumpa se používá ve spojení s matrací s kompresovaným vzduchem, která je nafouknutá a vytváří „pumpování akci“. Tato pumpování akce lehce zvládne jemně decentralizovat tlak kostěné výstupky. Mimoto, tato pumpování akce masíruje svaly a zlepšuje oběh krve. DOLPHIN vzduchovo tlaková matrace je vynikající pro předcházení proleženinám.

1. Nastavte vypínač do polohy ON
2. Otočte tlakovou kontrolu po směru hodinových ručiček dokud neucítíte odpor, ale nesnažte se točit silou. Toto nastaví výchozí tlak do jeho nejvyšší hodnoty v nejkratším možném čase pro plné nafouknutí. Proces trvá asi 20 minut než se matrace nafoukne

Ukončení operace

1. Nastavte vypínač do pozice OFF
2. Odpojte vzduchové trubky z ze vzduchových vývodů pumpy, aby jste umožnily vzduchu z matrace volně uniknout ven.

Čištění

Pumpa

Vytáhněte kabel z elektrické zásuvky. Otřete všechny dostupné povrchy, včetně přívodního kabelu a vzduchových hadic. TO vše pomocí čisté hadry navlhčené standardních domácím přípravkem na čištění povrchů. Po vyčištění akci zopakujte akci znovu s čistým hadrem a čistou vodou. Nechte pumpu pořádně vyschnout

Upozornění :

- 1) **Použití isopropylové alkoholu nebo chemikálie na bázi rozpouštědla může pumpu poškodit. Jejich používání se nedoporučuje.**
- 2) **Ujistěte se, že pumpa je kompletně suchá předtím, než ji opět zapojíte do zásuvky**

Matrace

Použijte mýdlo nebo saponát a studenou vodu k očištění buněk matrace. Po vyčištění je nechte pořádně vyschnout

Upozornění Nevyvařovat! Nečistit na sucho.Nebělit.Nepoužívejte čisticí chemikálie. Nežehlete.

Skladování

Ke skladování Vaší DOLPHIN vzduchovo tlakové matrace postupujte dle těchto kroků:

1. Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky a smotejte ho ke skladování
2. Smotejte trubice pro skladování. Zabraňte zauzlování
3. Přeložte matraci pro skladování, avšak neskladujte matraci jestliže je mokrá nebo vlhká. Nechte matraci pořádně vyschnout, aby jste zabránily potenciální tvorbě plísní
4. Skladujte všechny části na suchém místě mimo dosah extrémního horka nebo chladu
5. Jestliže používáte přístroj po velmi dlouhé době, je lepší ho nechat zkontrolovat našimi servisními pracovníky

Údržba

K lepšímu efektu pro předcházení proleženinám je důležité provádět pravidelnou kontrolu a údržbu výrobku. Filtr a gumová zakončení jsou části, které jsou spotřebního charakteru. Doporučujeme jejich občasnou výměnu

Řešení problémů

Jestliže máte problém s pumpou, projděte nejdřív následujícího průvodce pro nalezení možných řešení. Jestliže nejste schopni pumpu opravit pomocí zde vypsanych řešení, předejte předmět našemu servisnímu středisku, kde bude problém prozkoumán a případně opraven.

Upozornění : Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Odstraňování krytu a oprava všech vnitřních součástí musí být zásadně prováděna našimi servisními pracovníky. Nejsme zodpoví za žádnou škodu způsobenou neautorizovanou opravou výrobku.

Pumpa nefunguje, dokonce i vypínač je nastavený na ON

1. Je přívodní kabel zapojený do zásuvky?
 - Připojte kabel do zásuvky.
2. Je elektrická zásuvka připojena na jiný přepínač v domě?
 - Zapněte přepínač do polohy ON
3. Není vyhořelá pojistka?
 - Vyměňte pojistku za novou
4. Není pojistka elektrické zásuvky vyhořelá nebo není vypínač okruhu vyhořelý nebo otevřený?
 - Vyměňte pojistky nebo resetujte vypínač okruhu. Jestliže pojistka vyhoří znovu nechte si udělat prohlídku elektrického okruhu a přístroj zapojte do jiného elektrického okruhu
5. Není přístroj připojen k zásuvce která přivádí špatné napětí?
 - Požadavky na napětí jsou uvedeny na zadní straně pumpy. Tyto požadavky musí být nezbytně splněny.
6. Je přívodní kabel poškozen?
 - Nechte kabel zkontrolovat a jestliže je poškozen, vraťte ho našim servisním pracovníkům pro případnou výměnu.

Pumpa funguje, ale matrace se nafukuje pomaleji než je obvyklé nebo není nafouknuta tlakem předepsaným Vaším lékařem.


1. Jsou připojeni všechny přívodní trubky tak, že nevznikají úniky vzduchu?
 - Zkontrolujte a zajistěte všechna připojení
2. Nejsou trubky zauzlovány, přiskřípnuty nebo zablokovány?
 - Přemístěte trubky tak, aby jste zabránili výše uvedeným možnostem
3. Není na některé z buněk díra?

- Vraťte poškozené buňky našim servisním pracovníkům pro testování a případnou opravu
4. Slyšíte unikání vzduchu uvnitř pumpy během nafukovací fáze?
- Předejte pumpu našim servisním pracovníkům pro případnou opravu

Servisní prohlídky

Tento produkt nepožaduje žádné rutinní prohlídky, vyjma čištění, popsáno na jiném místě tohoto manuálu. Avšak je doporučováno min. jednou za rok provést prohlídku matrace a pumpy našimi servisními pracovníky

Výměna pojistky

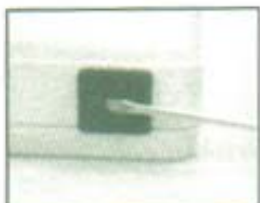

1.1. Pojistka je umístěna na straně pumpy vedle zástrčky na kabel

1.2. Použijte šroubovák pro vyjmutí pojistky




2. Vyměňte poškozenou pojistkou za novou 0,5A pojistku



3. Zadějte pojistku zpátky do přístroje

Výměna buňky

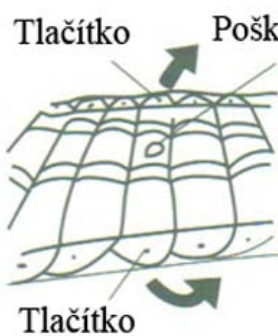

1. Oddělte dvě strany poškozené buňky



2. Oddělte poškozenou buňku a vzduchovou hadici



3. Vytáhněte poškozenou buňku



4. Vložte novou buňku



5. Spojte vzduchovou hadici a novou buňku



6. Připojte obě strany nové buňky

Technické specifikace:

Matrace – DN 100 – bublinový typ – oddělatelný povrch

Velikost povrchu – 190 x 90 x 5 cm – 70 buněk

Materiál : PVC, není voděodolná

Pumpa – 27 x 14 x 8 cm – 1,6 kg

Napětí – 110v/ 220v - Výdej vzduchu – 4,5 LPM

Čas jednoho cyklu : 8 minut



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.
Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.
☎ 549 245 575; 602 766 759