

**NÁVOD K OBSLUZE**  
**Termostimulační a elektrostimulační přístroj s chromoterapií**  
**INFRA JETT SLIM TUNEL**  
**Poslední revize návodu dne 7.2.2013**



Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod , nikdy neumísťujte elektrody na hrud' a záda v blízkosti srdce. Pečlivě se přesvědčte , že klient netrpí žádnou kontraindikací !!

V dnešním pojetí krásy hraje perfektní pleť velkou roli. Na základě vzhledu a stavu pleti můžeme posuzovat jak krásu, tak i zdraví jedinců. Hladká pleť je jedním z nejneocenitelnějších módních doplňků. Většina žen však musí čelit různým druhům problémů s pletí způsobeným podnebím, znečištěním, stárnutím, nebo jinými podobnými faktory. Tento kosmetický přístroj generuje speciální druh syntetické hudby kombinované s infračerveným zářením, barevným světlem a elektrodovou terapií. S pomocí infračerveného paprsku pronikajícího hluboko do kůže a s dodatkovými funkcemi jako vysokofrekvenční akubodové průniky nebo elektrodový balíček dokáže tento přístroj urychlit spalování tuku a dosáhnout vybělení pokožky,

formování svalů, zeštíhlení a odstranění vrásek. S naším zeštíhlejícím přístrojem pracujícím na základě fototerapie už jemná, hladká a přirozená pleť nemusí být jen snem, ale stane se skutečností. Vyspělá technologie využívající barevná světla kombinuje čtyři druhy světelného vlnění s infračerveným zářením, čímž se docílí jedinečného účinku na tělo i duši.

Když klient leží v kabině, je to jakoby byl v tajemném vesmíru a cítí psychickou a mentální harmonii.

## Funkce a charakteristika

### 一、 Fototerapie

Infračervené záření je světlem života - dokáže pronikat do pokožky, buňky jej lehce absorbují a dokáže proniknout až 3-5 cm hluboko do pokožky. Za pomoci teplotního působení a rezonance může rozkládat a spalovat tuk.

Vaše tělo spotřebuje 600 kalorií. Když v kabině strávíte 20-30 minut, je to jakoby ste uběhli 10 tisíc metrů.

Vzdálené infračervené záření je prospěšné Vašemu zdraví:

#### A. Aktivace molekul vody a zlepšení absorpce kyslíku

70% lidského těla tvoří voda, krev je tvořena vodou ze 70%.

Vzdálené infračervené záření dokáže rozrezonovat molekuly vody, zlepšit absorpci kyslíku, aktivovat buňky, osvěžit váš mozek a posilnit vaši imunitu. Díky hloubkovému hřejivému efektu dokáže tělo vstřebat dostatek živin a Vy se cítíte zdravější a uvolnění.

#### B .Zlepšení oběhu

Vodní molekuly mohou volně procházet skrz buňky a mohou být rezonancí proměněny na termální energii, která zrychluje krevní oběh a rozšiřuje kapiláry. Může se tak výrazně ulevit srdci, jelikož zásobování kyslíkem a přívod výživy do buněk je dostatečný a z metabolismu se odvádí škodlivé látky. Pokud je v krevním oběhu nějaký problém, může to způsobovat vysoký krevní tlak, kardiovaskulární problémy, rakovinu, artritidu nebo pregresivní paralýzu. Kapiláry sehrávají v lidském těle nenahraditelnou funkci a jsou také nazývány druhým srdcem.

### C. Stimulace metabolismu

Když se zlepší oběh, odpadní látky jsou z metabolismu odstraňovány rychleji a uleví se tak játrům a ledvinám. Tyto odpadové látky zahrnující kupříkladu těžké kovy mohou vést k vzniku rakoviny, mléčné kyseliny mohou způsobovat únavu a stárnutí; patří sem také podkožní tuk a mastné kyseliny, uranové ionty zodpovědné za vysoký krevní tlak, nebo kyselina močová způsobující bolesti. Tím, že se zlepší krevní oběh a rozšíří cévy, jsou vyživující látky dopraveny do všech částí těla, takže se celkově zlepší metabolismus, jednotlivé buňky se regenerují, což výrazně pomáhá srdci a Vaše pleť je mnohem jemnější a saténově hebká.

### .D. Vyrovnávání kyselosti a zásadovosti

Vzdálené infračervené záření dokáže čistit krev, zlepšovat imunitu, aktivovat buňky, má léčebný efekt a dokáže také zmírňovat bolest. Díky jeho průniku a hloubkovému tepelnému efektu dokáže tělo vstřebávat množství živin a dokáže také podpořit aktivitu buněk. Termální energie zlepšuje krevní oběh, zlepšuje energetické kanály, pomáhá při artritidě a revmatismu a ulevuje od bolesti způsobené kyselinou močovou.

### E. Spalování energie a tuku a redukce váhy

Vibrace vzdáleného infračerveného záření dokáže stimulovat spalování energie, zvyšovat tělesnou teplotu, zlepšovat metabolismus, odstraňovat tuk a vrásky, redukovat sekreci mazu, akné, pupínky a dokáže tak celkově zlepšit stav pokožky.

## 二. Účinky energie barevného světla:

Jak je známo, účinky barevného světla jsou pro člověka prospěšné jak fyzicky, tak psychicky. Běžná ošetření tváře účinkují pouze na epidermální část pokožky bez hloubkových léčebných účinků. Filtrované barevné světlo však dokáže proniknout až do oblasti dermis a odstartovat fotochemickou reakci působící na tkáň a ošetrující pleť. Zvyšuje tvorbu kolagenového proteinu, stimuluje regeneraci buněk, obnovuje pružnost pleti, odstraňuje vrásky a zmenšuje póry. Působí také proti stárnutí a ochablé kůži.

### 1. Červené světlo

Účinnost: vzrušující a teplé, stimuluje a revitalizuje buňky, blahodárně působí na srdce, mozkovou aktivitu a dýchání

Fyzioterapeutická funkce: odstranění vrásek, skvrn a akné, stimulace krevního oběhu a metabolismu, revitalizuje kožní tkáň

### 2. Žluté světlo

Účinnost: stimuluje nervy, zvyšuje krevní tlak, zvyšuje pulsovou frekvenci, posiluje imunitu a zlepšuje trávení.

Fyzioterapeutická funkce: zlepšení vstřebávání kyslíku, stimulace krevního oběhu, revitalizace kůže a zlepšení trávení.

### 3. Modré světlo

Účinnost: cítíte se svěžeji, uvolňuje napětí, snižuje krevní tlak, vyrovnává mysl a pomáhá soustředit se.


Fyzioterapeutická funkce: tvorba lepivého proteinu, oživení pleti a zpevnění ochablé kůže.

### 4. Zelené světlo

Účinnost: Tato přirozená barva má zklidňující léčivé účinky, zmírňuje hněv a depresi a vy se cítíte odpočínutě a uvolněně.

Fyzioterapeutická funkce: zlepšování činnosti žláz, odstraňování skvrn, akné a pupínků.

INFORMACE O UŽIVATELSKÉM ROZHRANÍ

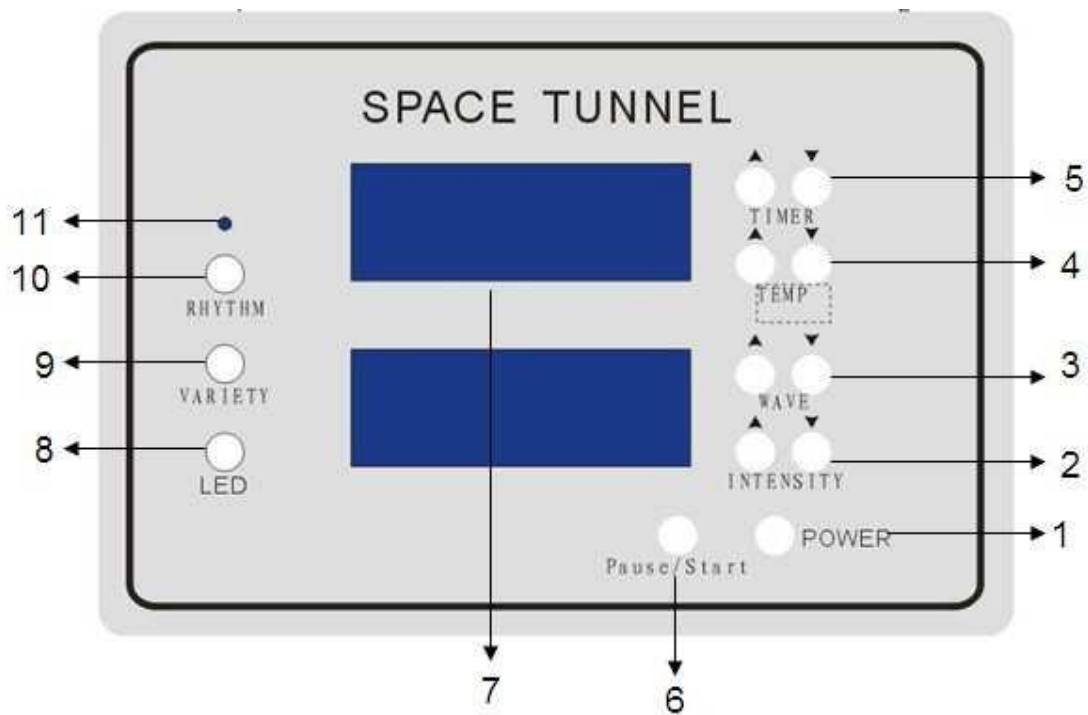

1. Vypínač
2. Nastavení intenzity elektrické terapie
3. Výběr typu vlnění u elektrické terapie
4. Nastavení intenzity barevného světla
5. Výběr délky ošetření
6. Start/pauza
7. Displej
8. Controlka barevného LED světla
9. Výběr barvy
10. Nastavení frekvence záblesků
11. LED displej

Instalační kroky





Instrukce týkající se funkce barevného světla:

1. Zapněte přístroj (červené tlačítko na zadní straně přístroje)
2. Stiskněte tlačítko 'power', čímž zapnete hlavní motor přístroje
3. Stiskněte tlačítko 'START' pro odstartování činnosti těla přístroje
4. Pro výběr doby ošetření, stiskněte tlačítko 'TIMER'.
5. Pro nastavení intenzity barevného světla stiskněte tlačítko 'TEMP'
6. Pro odstartování činnosti barevného LED světla stiskněte tlačítko 'LED'
8. Pro nastavení módu barevného světla stiskněte tlačítko 'VARIETY' a 'RHYTHM'
9. Pro vypnutí hlavního panelu stiskněte tlačítko 'power'
10. Vypněte barevné LED světlo.
11. Vypněte přístroj centrálně (červené tlačítko na zadní straně přístroje)
12. Po použití vypojte přístroj z elektřiny.

Zacházení s vodivými částmi pro elektrické terapie

1. Ujistěte se, že intenzita je nastavena na nulu (pozice "zero"). V opačném případě nebude přístroj pracovat správně a může se spustit alarm.
2. Zapojte elektrody, přiložte je na tukovou oblast a připevněte je k tělu. (neaplikujte na oblast srdce). Vzdálenost mezi kladnou a zápornou elektrodou by měla být cca 5 cm.
3. Stiskněte tlačítko 'power', čímž zapnete hlavní motor přístroje
4. Stiskněte tlačítko 'START' pro odstartování činnosti těla přístroje
5. Pro výběr frekvence a tvaru aktivních vln stiskněte tlačítko 'wave'.
6. Pro nastavení intenzity stiskněte tlačítko 'INTENSITY'.
7. Pomalu otáčejte tlačítkem do té míry, dokdy je to pro pacienta snesitelné. Dávejte

pozor, abyste neotáčeli knoflíkem příliš rychle.

8. Po použití vraťte knoflík do původní polohy.

9. Stiskněte tlačítko 'power', čímž vypnete hlavní část přístroje.


10. Vypněte přístroj centrálně (červené tlačítko na zadní straně přístroje)

11. Po použití vypojte přístroj z elektriny.

### Popis umístění vodivých částí elektrické terapie

Umístění vodivých částí je navrženo speciálně v kombinaci se svalovými pohyby.



Podle potřeby pacienta vyberte jednu z následujících pozic. Na konci každého vodivého kabelu jsou dvě barvy: červená (pro kladnou elektrodu) a černá (pro zápornou elektrodu). Ujistěte se, že jste umístili vodivé části přesně podle jednoho z následujících nákresů. Pokud tak neučiníte, může to vést k nepříjemným pocitům pacienta a nemusí být dosaženo žádoucích léčebných účinků.

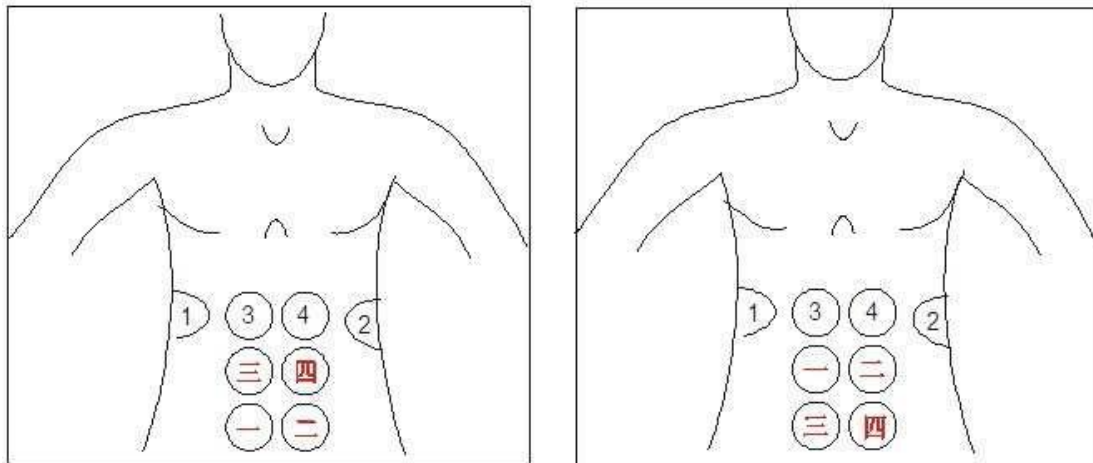

1.) Umístěte vodivé části v diagonální linii a vertikálně kolem pasu a břicha. V této pozici účinkují na tuk na břiše a v jeho spodní části.



2.) Mírně pozměňte umístění vodivých částí. V této pozici dochází k redukci tuku v krajních oblastech břicha.



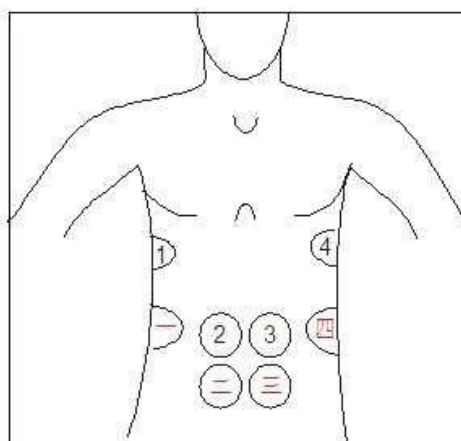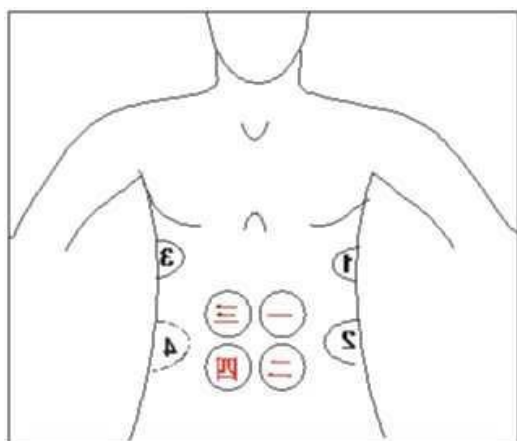



3.) Umístěte vodivé části v diagonální linii kolem pasu a břicha. V této pozici se působí na nadbytečný tuk v oblasti pasu.

4.) Posunujte vodivé části směrem nahoru a dolů. Tak se působí na boční části pasu a břicha.

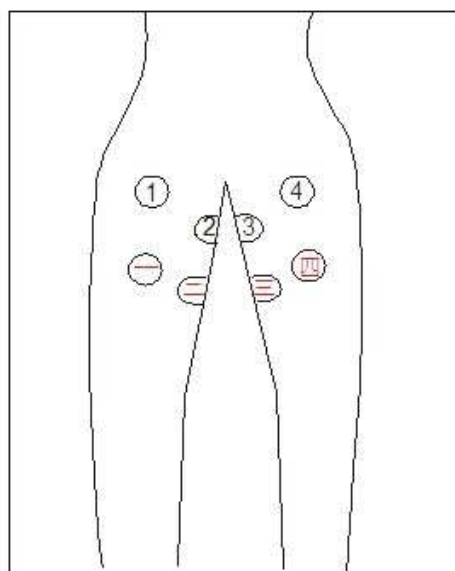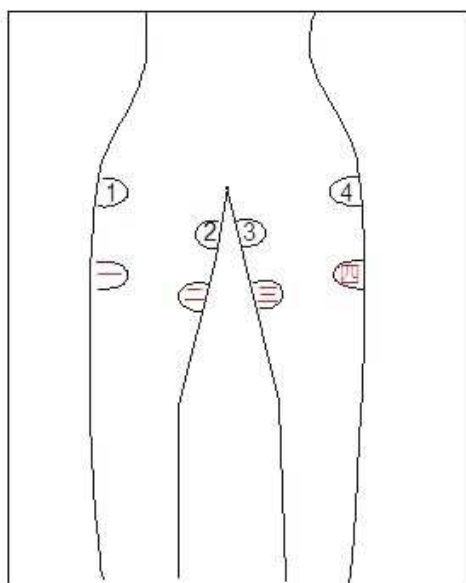


5.) V této pozici se působí na nadbytečný tuk v oblasti stehen a povadlé svalstvo.

6.) V této pozici se působí na tuk v přední části stehen a povadlé svalstvo.

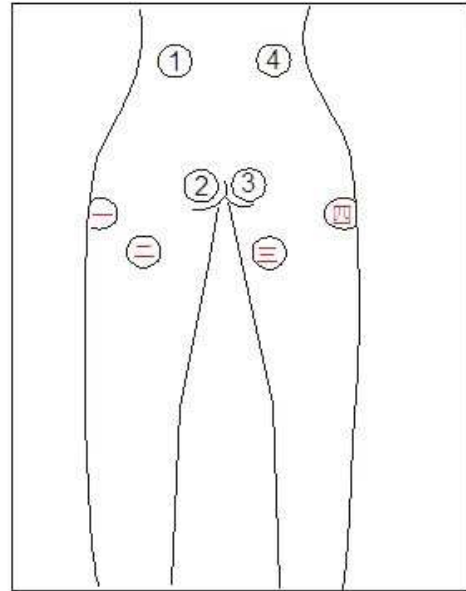
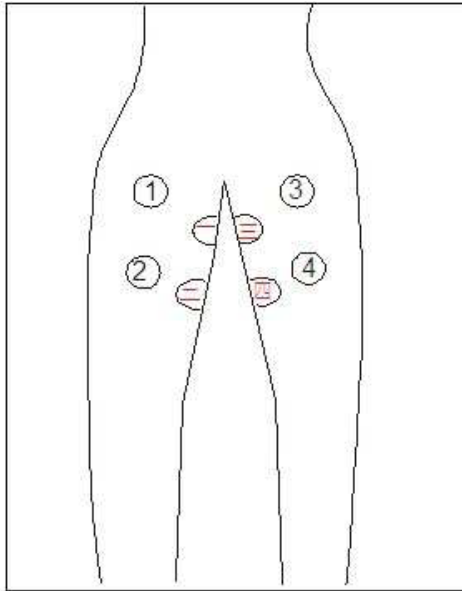


7.) Působení na stehna a oblasti kolem kolen.



8.) Působení na hýždě a stehna.

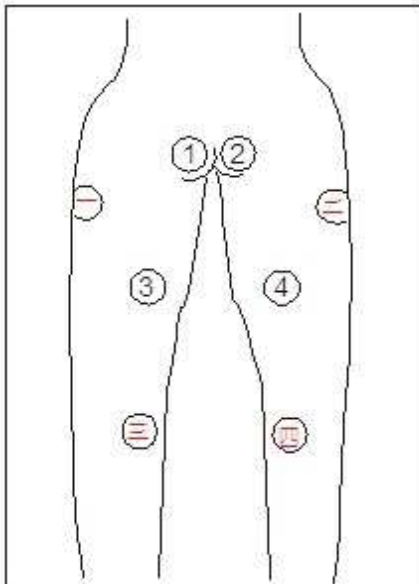



9.) Působení na hýždě, stehna a lýtka. Budují se svaly.

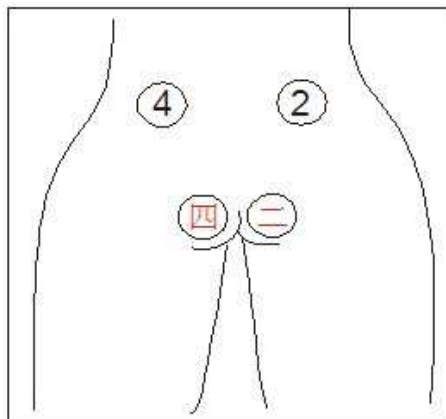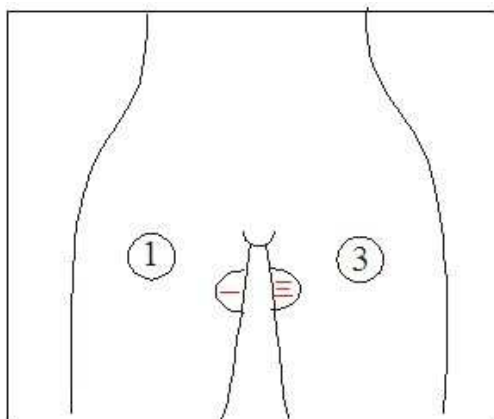

10.) Působí na hýždě a stehna. Pomáhá na hýždích budovat pružné svaly.

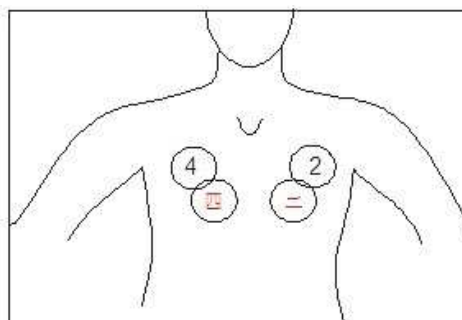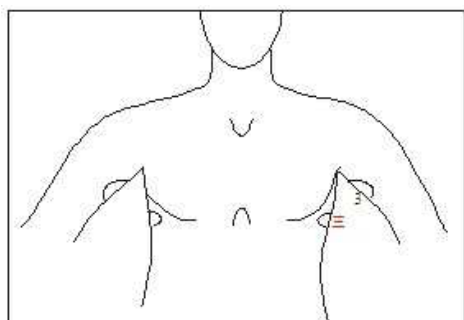

11.) Vrchní část ramen a podpaží. Buduje pružné svaly.

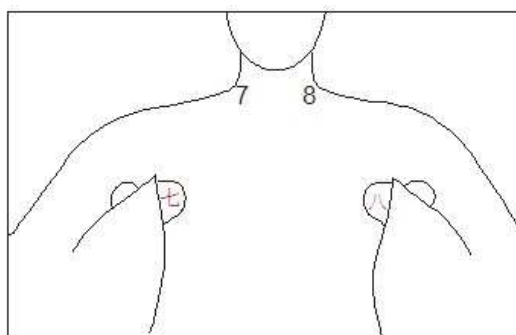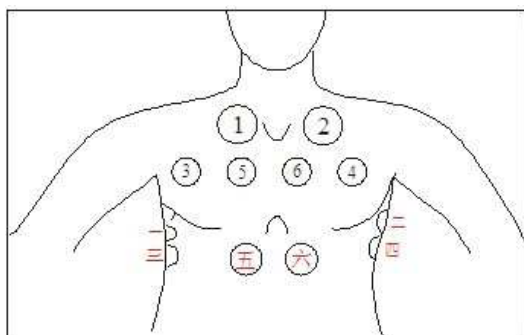

12.) Působí na oblast prsou a ovlivňuje vnitřní oběhový systém.

Bezpečnostní omezení :

1. Neumísťujte vodivé části na zraněná nebo zapálená místa.
2. Neumísťujte vodivé části na jizvy nebo pokožku narušenou operací 10 měsíců po zákroku.
3. Neumísťujte vodivé části na břicho, pokud jste jedli před méně než hodinou.
4. Lidé trpící srdečními chorobami by toto zařízení neměli používat.
5. Použití přístroje není dovoleno osobám trpícím závažným onemocněním žaludku, onemocněním střev, jater nebo pacienti s kameny v močovém měchýři.

6. Přístroj nesmí používat ani osoby trpící epilepsií nebo závislostí na alkoholu.
7. Přístroj nesmí používat děti do 15 let a těhotné ženy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8. Pokud při užívání máte abnormální pocity, přístroj přestaňte hned používat
9. nikdy neumísťujte elektrody na hrud' ani záda v blízkosti srdce!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Technické parametry:

Model: MZ-S220

Napětí: 110V-240V

Elektrický proud: 7A

Výkon: 1500w

Rozměry:230X105X140CM

Velikost balení:

Lůžko:227X101X79CM

Přední kryt:112X62X138CM

Zadní kryt: 112X62X148CM

**KONTRAINDIKACE :**

Je zakázáno používat tento přístroj pro klienty s těmito kontraindikacemi :

- **Těhotné nebo kojící ženy**
- **Epilepsie**
- **Nádorová onemocnění**
- **Akutní zánět nebo infekční choroba**
- **Srdeční či ledvinová onemocnění**
- **Vážná cukrovka**
- **Potíže s krvácivostí, srdcem, mozkiem, páteří nebo krčními uzlinami**
- **Voperované zařízení vysílající pulsy, implantáty (včetně plastických), výztuže kostí. Tj kardiostimulátory...**
- **Ošetření břicha se nesmí provádět v případě menstruace nebo inkontinence.**

- **Změněná vnímavost tepla, přirozeně vysoká teplota těla**
- **Atopický ekzém**
- **Tromboza**
- **Onemocnění žaludku**
- **Kameny v močovém měchýři**
- **Závislost na alkoholu a omamných látkách**

Bezpečnostní upozornění:

Děkujeme Vám, že používáte náš produkt. Abyste zajistili, že bude pracovat normálně, bezpečně a bude udržovaný, dodržujte, prosím, následující instrukce:

1. Tento produkt je high-tech produkt, nerozmontovávejte ho, o veškeré opravy se postará náš školený personál.
2. Ujistěte se, že zásuvka ani elektrický kabel jsou zabezpečeny a nepříjdou do kontaktu s vodou. (10-30A pojistka)
3. Pokud se přístroj nechce připojit k elektřině, zkontrolujte pojistku a vyměňte ji za novou stejného typu.
4. Po skončení používání nejdříve vypněte hlavní část přístroje a potom jej vypněte centrálně.
5. Zabraňte tomu, aby přístroj přišel do kontaktu s vodou, ohněm, vlhkostí, korozi a interferencí.
6. Pokud přístroj používáte dlouhou dobu, nepoužívejte jej vkuse, mezi jednotlivými ošetřeními by měli být aspoň desetiminutové intervaly.

Údržba:

Na tento produkt se vztahuje roční záruka. nevztahuje se však na následující situace. Nedodržení instrukcí k ovládání a provozování a náhodné poškození.

Výměna součástí přístroje bez dohledu kvalifikovaného elektrikáře nebo technického pracovníka.

Jak přístroj udržovat:

1. Omyjte jej navlhčeným hadříkem a vhodným čistícím prostředkem. Nepolévejte

vodou!

Poznámka: Když s přístrojem nepracujete, vypněte jej a odpojte ho z elektřiny.

Přístroj a všechny jeho části udržujte v suchu.

Výrobce : HK MEIZI BEAUTY EQUIPMENT MANUFACTURER



3 rd Floor, NO 8 Building , North RD Of School

Jiang xia Factory, Baiyun District , Guanzhou City , Guangdong

Republic of China

Distributor : Compex spol. s r.o. , Palackého Třída 105 , 61200 Brno , ČR

Tel : 00420 602 766 759 , 00420 5 4924 4996