

Ultrazvukový kavitační přístroj CAVIJETT1

-

Návod k použití



Obsah

OBSAH	2
ÚVOD	3
ÚČEL POUŽITÍ	3
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	3
OSOBY, KTERÉ NESMÍ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	5
KONTRAINDIKACE	5
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	6
PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU - CAVIJETT1 - ULTRA KAVITAČNÍ GENERÁTOR	7
REFERENCE	7
VLASTNOSTI PRODUKTU	7
POPIS PRODUKTU.....	8
PŘÍSLUŠENSTVÍ	9
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	9
JAK PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	10
I. PŘÍPRAVA NA POUŽÍVÁNÍ	10
II. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	10
TIPY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ	12
BODY BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY	13
ŘEŠENÍ DROBNÝCH PROBLÉMŮ	13
TECHNICKÉ PARAMETRY	14
PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY PRO TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ	14

Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Zvýšenou pozornost prosím věnujte zejména bezpečnostním upozorněním a při používání tohoto přístroje vždy dodržujte všechny uvedené bezpečnostní pokyny. Jen tak budete moci zcela využít všech výhod a předností tohoto přístroje.

Výrobce si zachovává právo na změnu vzhledu a popisu tohoto produktu bez předchozího upozornění.

Tento návod si prosím pečlivě přečtěte a poté jej uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí!

V případě jakýchkoliv nejasností, týkajících se používání výrobku, se neváhejte obrátit na Vašeho prodejce. Kontakt naleznete na poslední straně tohoto Návodu.

Účel použití

Přístroj je určen pro odstranění přebytečných tukových vrstev a redukci celulitidy. Je výhradně určen pro estetické účely, kde vlivem odbourávání tuku dochází k modelaci a zkrášlování postavy a účelem použití není tedy léčba, mírnění příznaků nemocí eventuelně preventivní účinky.

Na základě výsledků klinického hodnocení mohou přístroj také obsluhovat kosmetičky a maséři v rámci živnosti: masérské a rekondiční služby. Avšak za předpokladu, že projdou přísným zaškolením na referenční klinice, jež má dovozce, firma Compex spol. s r.o., k dispozici.

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce a opatření uváděná v tomto návodu jsou identifikovány a specifickými symboly. Před používáním přístroje je důležité těmto symbolům a jejich významu porozumět. Význam jednotlivých symbolů je následující:



UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje na situace, které při nedodržování bezpečnostních opatření mají potenciál způsobit mírné zranění či poškození zařízení.



VAROVÁNÍ

Upozorňuje na situace, které při nedodržování bezpečnostních opatření mají potenciál způsobit vážná zranění či nenávratná poškození přístroje.



VÝSTRAHA

Porušení bezpečnostních opatření v uvedených situacích bezprostředně hrozí smrtí, nebo opravdu vážným zraněním.

POZNÁMKA

Text takto označený přináší užitečné informace, přinášející pomoc v daných situacích, nebo pomáhají lépe pochopit fungování.



UPOZORNĚNÍ

- Před používáním přístroje konzultujte zapojení se zkušeným technikem.
- Všechna přípojitelná zařízení musí být zapojena ve správné pozici.
- Přístroj neinstalujte do prostředí s přítomností olejů, kouře, prachu a nečistot, nebo prostředí, kde by mohlo dojít ke kontaktu přístroje s vodou (deštěm).
- Prosíme, dodržujte doporučené doby a techniky používání.
- (Přístroj používejte jednou, maximálně dvakrát denně a jeho používání nekombinujte s používáním žádného jiného přístroje jiného výrobce.)
- Přístroj instalujte pouze na rovný povrch.
- Pokud se při používání přístroje budete cítit jakkoliv neobvykle, či nepříjemně, konzultujte další používání přístroje se svým lékařem.
- Po skončení používání přístroje vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Stejně tak učinite, pokud budete vědět, že nebude přístroj delší dobu používán (mohlo by dojít ke vznícení).
- Neohýbejte elektrický kabel (hrozí riziko elektrického zkratu či vznícení), na zařízení přístroje nepůsobte přílišnou silou a na přístroj nepokládejte žádné těžké, nebo ostré předměty.
- Před zapojením přístroje zkontrolujte, zda zásuvka pro napájení disponuje požadovaným napětím. (V opačném případě hrozí spálení elektrických obvodů.)
- Na přístroj nepokládejte předměty, které hrozí vznícením - svíčky, cigarety, lihoviny. Na přístroj nepokládejte nádoby naplněné vodou, nebo jiné těžké předměty.



UPOZORNĚNÍ

- Pokud při používání přístroj budete mít jakékoliv problémy, ihned přestaňte přístroj používat a kontaktujte servisní centrum prodejce (kontakt na poslední straně návodu).
- Osoby, které trpí, nebo je u nich podezření například na záchvaty zuřivosti, vysoké horečky, osoby těhotné, osoby s poškozením pokožky, nebo osoby s onemocněním kůže v místech, použití přístroje, stejně jako osoby trpící únavovým syndromem, alergiemi, či osoby vyžadující trvalý dohled, musí před prvním použitím konzultovat používání přístroje se svým lékařem.
- Na přístroj nepokládejte žádné vznětlivé předměty, mimo pásu dodávaného s přístrojem.
- Přístroj nerozebírejte, neopravujte, ani se jej podle vlastních nápadů nepokoušejte upravovat. Pro opravu či jakoukoliv pomoc vždy kontaktujte servisní centrum prodejce.
- V následujících případech kontaktujte servisní centrum prodejce pro kontrolu, či opravu:
 - Napájecí kabel je zničen, nebo poškozen a přístroj nepracuje správně.
 - Přístroj upadl z výšky na zem a je poškozený.
 - Přístroj byl zasažen vodou.

CAVIJETT1 – Ultrazvukový kavitační přístroj – Návod k použití

- Přístroj připojujte pouze do uzemněné elektrické zásuvky.
- Nepoužívejte poškozený elektrický kabel, ani jej nezapojujte do zastaralé a poškozené elektrické zásuvky.
- Zamezte nárazům a otřesům přístroje a jeho součástí.



VÝSTRAHA

- Elektrody přístroje nikdy nenastavujte přímo proti očím. Hrozí vážné poranění očí.
- Zástrčku z elektrické zásuvky nikdy nevytahujte silou, ani trhnutím za kabel. Napájecím kabelem nemanipulujte, pokud máte vlhké ruce.
- Zastavte používání přístroje a napájecí kabel vytáhněte z elektrické zásuvky pokud je bouřka a blyská se, nebo v případě zemětřesení.

Osoby, které nesmí přístroj používat

Následující osoby nesmí NIKDY přístroj použít:

- Osoby s umělým srdcem, či ledvinou.
- Osoby s voperovaným kovovým implantátem v těle.
- Ženy které jsou těhotné.
- Osoby s vysokou srážlivostí krve, krvácením způsobeným zraněním či operací a osoby s tendencí ke krvácení.
- Osoby s vysokým krevním tlakem.
- Osoby popálené, nebo v procesu léčby popálenin.

Kontraindikace

- Srdeční choroby
- Jaterní choroby
- Aktivní cévní choroby
- Neoplasia
- Vestavěné kardio stimulátory
- Pacienti s trombózou, nebo tromboplebitis
- Diabetes
- Pacienti absolvující antikoagulační terapii (proti srážlivosti krve)
- Pacienti, kteří podstoupili operaci s transplantací
- Pacienti s protézou
- Těhotné ženy

Oblasti, které není možné přístrojem CAVIJETT1 ošetřovat:

- hlava,
- srdce,
- krk,
- podpaždí,

CAVIJETT1 – Ultrazvukový kavitační přístroj – Návod k použití

- třísla,
- dlaně,
- chodidla,
- zákolenní oblast,
- páteř.

Následující oblasti mohou být ošetřovány v délce 10-20 minut v závislosti na velikost a individuální reakci ošetřované osoby:

- paže,
- břicho,
- boky,
- kolenní kloub,
- boky,
- stehna,
- kotníky,
- lýtka.

Doporučujeme 6-8 sezení za týden a pro dlouhotrvající účinky každý měsíc pravidelně udržovat.

Bezpečnostní opatření

Tato bezpečnostní opatření jsou určena pro osoby absolvující léčbu pomocí přístroje CAVIJETT1 a jsou navázána na správné používání přístroje. Před prvním použitím přístroje si je dobře prostudujte!

- Toto zařízení nesmí být v žádném případě používání osobami s vestavěným kardiostimulátorem a těhotnými ženami.
- Nepoužívejte přístroj, pokud jste právě nemocní.
- Zařízení může provozováno pouze napájením z elektrické sítě odpovídající příslušným normám.
- Nepoužívejte přístroj, ani žádné jeho součásti, pokud je mokrá.
- Zabraňte současnému použití tohoto zařízení a jiného elektrického přístroje u jednoho pacienta.
- Současné použití více zařízení produkujících vysokofrekvenční vlnění (krátké vlny, mikrovlny, radio frekvenční epilátory, aj.) na jednom místě, může způsobit nefunkčnost tohoto zařízení.
- Používejte elektrody pouze způsobem popsáným v tomto manuálu. Na každou určitý typ léčby a pouze tam, kde je to vyžadováno.
- Zařízení udržujte vždy čisté.
- Na zařízení nepokládejte žádné předměty, stejně tak jako na napájecí kabel.
- Napájecí kabel pokládejte tak a tam, kde nemůže být přetržen, nebo jinak poškozen.
- Pro vypojení kabelu z elektrické zásuvky nikdy netahejte za kabel. Jednou rukou podržte elektrickou zásuvku, druhou rukou uchopte zástrčku kabelu a jemně zástrčku vytáhněte.

Představení produktu - CAVIJETT1 - Ultra kavitační generátor

Sestrojený na základě dlouhých výzkumů, s designem navrženým pro maximální účelnost, představuje přístroj CAVIJETT1 technologickou evoluci na poli zařízení určených pro provádění kavitace. CAVIJETT1 je přístroj na vysoké technologické úrovni.

Díky sofistikovaným mechanismům řízení zpětné vazby pracovních parametrů (rychlost tlaku, zvuková signalizace, teplota a odchylka od bodu maximálního výkonu), představuje nejlepší technologickou volbu pro lokální redukci tuku a léčbu celulitidy.

CAVIJETT1 umožňuje řešit široké oblasti problémů rychle, efektivně a s naprostou bezpečností.

CAVIJETT1 je moderní zařízení s půvabným vzhledem, vybavený uživatelsky příjemným ovládacím displejem. Abyste si mohli naplno užít jednoduše zautomatizované volby nastavení přístroje, je pro každý program připraven krátký návod.

Reference

Dokument: *Prohlášení o účinnosti léčebné metody Kavítace* - Japan Society of Aesthetic Plastic Surgery (JSAPS), Ósaka, Japonsko, 25. červenec 2009.

Vlastnosti produktu

- Neinvasivní liposukce bez nutnosti anestezie.
- Pohodlné používání bez bolesti.
- Výkonná ruční kavitační sonda.
- Uživatelsky příjemné ovládání prostřednictvím dotykového LCD displeje.
- Módní design.
- Bezpečný a účinný.

Popis produktu



Přední pohled

1. Ovládací dotykový LCD displej
2. Tlačítko On/Off (Zapnutí/Vypnutí)



Zadní pohled

1. Hlavní vypínač napájení
2. Konektor pro sondu
3. Pojistky (2x T3A)
4. Vstup napájecího kabelu


CAVIJETT1 – Ultrazvukový kavitační přístroj – Návod k použití

Příslušenství



1. Ruční sonda
2. Ultrazvukový gel (250 ml)
3. Napájecí kabel

Uživatelské rozhraní

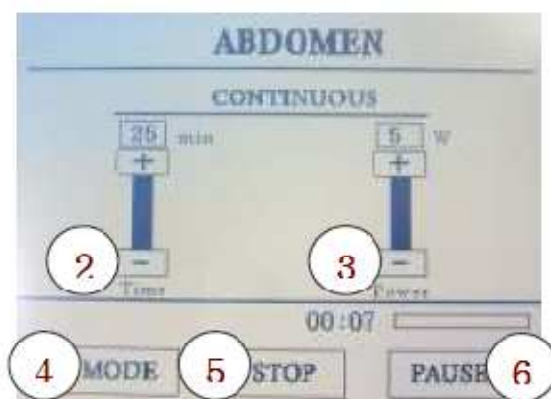

Č.	Název	Funkce
1	Program (Masážní oblast)	Volba masážní oblasti: Abdomen (Břicho), Waist Line (Boky), Back (Záda), Inner Thigh (Vnitřní stehna), Hip (Pas), Calf (Lýtka), Arm (Paže)
2	Power (Výkon)	Možnost zvýšení, nebo snížení intenzity masáže
3	Mode (Režim)	Režim masáže – Continuos (Nepřerušovaný), Interval (Intervalový)
4	Time (Časovač)	Nastavení délky masáže


CAVIJETT1 – Ultrazvukový kavitační přístroj – Návod k použití

5	Stop/Esc (Zastavení masáže)	Přerušení masáže a přechod do hlavního menu
6	Start/Pause (Začátek/Konec)	Opuštění pro zahájení masáže, nebo její pozastavení

Jak přístroj používat

I. Příprava na používání

- 1) Zkontrolujte, zda zařízení obsahuje všechny součásti, které má mít. Pokud chybí konektor pro připojení sondy, nebo neposkytuje dobré propojení, ihned kontaktujte prodejce.
- 2) Zástrčku napájecího kabelu zapojte do otvoru pro vstup napájecího kabelu (viz obrázek níže).
- 3) Přepněte hlavní vypínač napájení do polohy "Zapnuto" (stínutá polovina vypínače se symbolem "O").

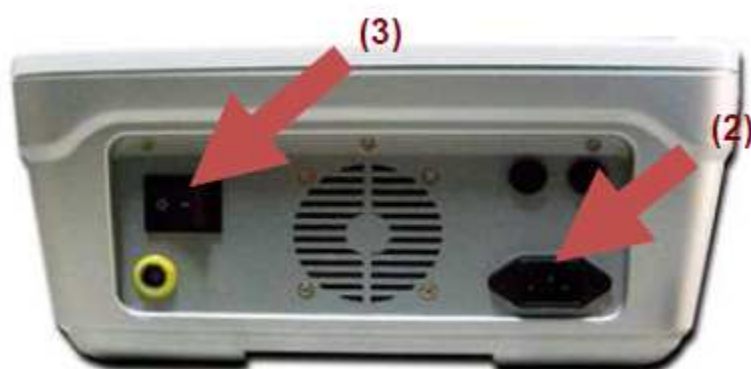

II. Používání přístroje

Používání přístroje CAVIJETT1 je velmi jednoduché.

- 1) Zkontrolujte, zda je napájecí kabel a kabel sondy správně a pevně zapojen.



- 2) Zvolte program odpovídající části těla, na níž se chcete zaměřit.



CAVIJETT1 – Ultrazvukový kavitační přístroj – Návod k použití

3) Nastavte jednotlivé atributy programu.



4) Délku trvání programu je možné nastavit tak, že stisknete příslušné tlačítko na displeji. Doba nastavení se zvyšuje/snižuje v 5 minutových stupních.



5) Pomalu zvyšujte hodnotu intenzity na správnou úroveň.



6) Po nanesení ultrazvukového gelu je možné přistoupit k použití ruční sondy.



7) Aplikovanou masáž provádějte krouživým pohybem po vybrané oblasti těla.



8) Zvukové znamení (pípnutí) oznámí, že uplynul naprogramovaný čas.



CAVIJETT1 – Ultrazvukový kavitační přístroj – Návod k použití

UPOZORNĚNÍ!

- Ruční sondu používejte v krouživých pohybech pro zasažení celé aplikované plochy. Nikdy se sondou nezůstávejte na jednom místě.
- Na stejnou část těla používejte ruční sondu POUZE jednou denně. Pokud chcete v jeden den používat přístroj ještě podruhé na jinou část těla, dodržujte mezi oběma aplikacemi minimálně 6-hodinový odstup.
- Ruční sonda nesmí být použita na oblast tváří či obličeje.
- Po použití přístroje vypněte napájení přístroje hlavním vypínačem napájení.

POZNÁMKA: *Ruční sonda (snímač) je nejcitlivější částí zařízení. Doporučujeme ji uchovávat po použití na vhodném místě tak, aby bylo zabráněno jejímu pádu nebo odření. Pro její čištění nepoužívejte alkoholové prostředky, ani prostředky založené na alkoholové bázi.*

Tipy pro bezpečné používání



Pokud není přístroj používán, odpojte jeho napájecí kabel z elektrické zásuvky.



Nedemontujte, upravujte, ani sami neopravujte přístroj. Pokud je nutná oprava, kontaktujte servisní centrum prodejce.



Pokud při používání zaslechnete neobvyklé zvuky, nebo zaregistrujete neobvyklé fungování přístroje, ihned jej vypněte a kontaktujte servisní centrum.



S napájecím kabelem zacházejte opatrně, nepřehýbejte jej. Mohlo by to způsobit elektrický zkrat.



V případě venkovní bouřky odpojte přístroj z napájení, zabráníte tím zkratu, vznícení, nebo poškození přístroje.



S napájecím kabelem nemanipulujte vlhkýma rukama. Mohlo by dojít ke zkratu a zásahu elektrickým proudem.



Nezapojujte napájecí kabel zařízení do zásuvky, do které je již zapojeno jiné zařízení. Mohlo by dojít ke vznícení.

CAVIJETT1 – Ultrazvukový kavitační přístroj – Návod k použití



Nepoužívejte poškozený kabel, nebo poškozenou zásuvku. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

OK



Pro napájení používejte pouze elektrickou zásuvku se správným uzemněním

Pokud dojde ke kontaktu přístroje s vodou, nebo vlhkostí, odpojte přístroj z napájení a nepoužívejte jej.

Body bezpečnostní kontroly

Před používáním přístroje:

- 1) Je napájecí kabel správně zapojen do elektrické zásuvky?
- 2) Zkontrolovali jste zapojení ruční sondy do hlavní jednotky přístroje?
- 3) Zkontrolovali jste, zda je zapnutý hlavní vypínač napájení?
- 4) Objevili jste na displeji nějaký problém?

Po použití přístroje:

- 1) Zkontrolovali jste, zda je vypnutý hlavní vypínač napájení?
- 2) Je napájecí kabel vypojen z elektrické zásuvky?
- 3) Vyčistili jste po použití ruční sondu?

Řešení drobných problémů

Předtím, než budete volat do servisního centra prodejce zkontrolujte, zda se váš problém nenechá vyřešit pomocí následujících rad:

Nejsou vidět žádné známky rozsvícení kontrolky na předním panelu.

Kontrola	Řešení
Zkontrolovali jste napájecí kabel?	Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
Zkontrolovali jste zapnutí hlavní vypínače napájení?	Zapněte napájení.
Zkontrolovali jste pojistky?	Nahraďte poškozené pojistky.

Pokud problém přetrvává, odpojte přístroj z napájení a kontaktujte servisní centrum.

CAVIJETT1 – Ultrazvukový kavitační přístroj – Návod k použití

Ruční sonda nepracuje.

Kontrola	Řešení
Zkontrolovali jste zapojení?	Zapojte správně a pevně všechny konektory.
Nastavili jste vhodnou úroveň?	Nastavte vhodnou úroveň.

Pokud problém přetrvává, odpojte přístroj z napájení a kontaktujte servisní centrum.

Technické parametry

Vstupní napětí:	240 V, AC 50/60 Hz
Spotřeba energie:	23 W
Bezpečnostní třída (EN60601-1)	Třída 1, Typ BF
Síťové pojistky:	2x T3A (5 x 20 mm)
Rozměry:	148 x 306 x 358 mm
Váha:	4,5 kg
Pracovní frekvence:	40 KHz
Pracovní režim:	Ruční sonda
Časovač použití:	0-30 minut

POZNÁMKA: *Výše uvedené technické parametry jsou uvedeny za zadním panelu přístroje.*

Prostředí a podmínky pro transport a skladování

Teplota:	-10° C - +35° C
Relativní vlhkost:	5-95 %
Atmosférický tlak:	500-1060 hPa

Starý nefunkční přístroj nesmí být zlikvidován s běžným směsným odpadem. Přístroj musí být zlikvidován odděleně jako nebezpečný odpad.

CAVIJETT1 – Ultrazvukový kavitační přístroj – Návod k použití

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.



Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno

ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.

☎ 549 245 575; 602 766 759