

# Antidekubitní matrace DN-500

## Návod k použití



Poslední revize návodu byla provedena dne 23.4.2010

## Antidekubitní matrace DN-500

### Úvod

Děkujeme vám za zakoupení této alternativní matrace s nastavitelným tlakem vzduchu. Před použitím tohoto produktu prosím věnujte několik minut přečtení tohoto návodu k použití, který obsahuje všechny bezpečnostní instrukce a pokyny k používání. Tento návod uchovejte na bezpečném místě pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Doufáme, že si budete plně užívat všech funkcí této zdravotní matrace.

### Důležitá upozornění

**Abyste předešli nehodě, dodržujte následující pokyny:**

- Připojte vzduchovou pumpu k řádně zapojené elektrické zásuvce.
- Vždy okamžitě po použití odpojte pumpu z elektrické sítě.
- Nikdy vzduchovou pumpu neumísťujte do míst, kde by mohla přijít do kontaktu s vodou.
- Pokud se pumpa dostala do kontaktu s vodou, nikdy na ni nesahejte a ihned ji odpojte z elektrické zásuvky.

**Abyste předešli zranění nebo požáru, dodržujte následující pokyny:**

- Pokud je vaše vzduchová pumpa připojená, pak by neměla nikdy zůstat bez dozoru.
- Pokud je pumpa používána dětmi nebo postiženými osobami, vždy zajistěte dozor dospělou odpovědnou osobou.
- Vaši vzduchovou pumpu používejte pouze k účelům, pro které byla vyrobena. Nikdy ji nepoužívejte jinak, než je uvedeno v tomto návodu.
- Vzduchovou pumpu nikdy nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí kabel nebo elektrickou zástrčku, pracuje nestandardně, spadla na zem, je poškozená nebo přišla do kontaktu s vodou. V takovém případě se obraťte na autorizovaný servis, kde bude provedena kontrola a případná oprava přístroje.
- Napájecí kabel vždy udržujte mimo horká místa.
- Nikdy neumísťujte vzduchovou pumpu na místa, kde by napájecí kabel nebo přírodní vzduchové hadice mohli způsobit riziko pro osoby neznalé používání tohoto produktu.

## Antidekubitní matrace DN-500


- Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikdy netahejte přímo za kabel.
- Před vzduchovým filtrem vaší pumpy musí být vždy dostatek volného místa. Nikdy pumpu neumísťujte na měkká místa, jako je například postel nebo pohovka, kde by mohlo dojít k zakrytí vzduchového filtru. Vzduchový filtr udržujte stále čistý a prostý od prachu, vlasů a podobných nečistot.
- Pokud si nejste jistí s používáním tohoto přístroje, konzultujte to se svým lékařem.

## Popis vzduchové pumpy



## Antidekubitní matrace DN-500

### Popis matrace

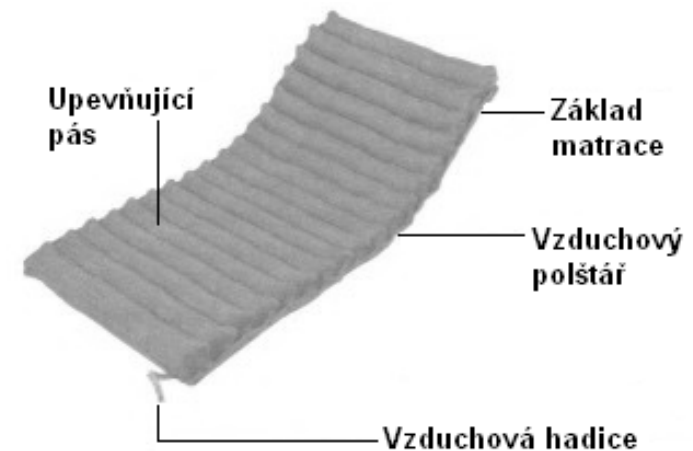

### Počáteční nastavení

**Poznámka:** Tato alternativní matrace s nastavitelným tlakem vzduchu je speciálně navržena pro použití s dodávanou vzduchovou pumpou. Použití jiné matrace než té, která je dodávána v originálním balení, může mít za následek nedostatečné fungování celého systému a není tedy doporučeno.

1. Položte matraci na postel. Věnujte pozornost směru matrace, značka „Dolphin“ by měla být na horní straně postele.
2. Zkontrolujte všechny vzduchové polštáře a ujistěte se, že jsou řádně připojeny a uloženy.
3. Nastavte hlavní vypínač (Power Switch) do polohy OFF.
4. Připojte napájecí kabel do zásuvky na vzduchové pumpě. Poté připojte druhý konec napájecího kabelu do elektrické zásuvky se správnou hodnotou dodávaného elektrického napětí (viz. technické parametry).
5. Zatlačením hadice do vzduchového vývodu umístěného na boční straně pumpy připojte vzduchovou hadici do pumpy.
6. Umístěte pumpu na pevný povrch nebo použijte pro její zavěšení upevňující háky.
7. Místo s vzduchovou pumpou udržujte čisté. Mnoho cizích látek jako je prach nebo vlasy může ucpat vzduchový filtr.
8. Vzduchovou hadici umístěte tak, aby nebyla zkroucená nebo skřípnutá.

### Popis ovládání

Pokud si nejste jistí, zda je pro vás používání antidekubitní matrace vhodné, konzultujte její použití se svým lékařem. Pumpa je používána pro přerušované napouštění matrace stlačeným vzduchem, což způsobuje efekt pumpování. Toto vzduchové pumpování zajišťuje šetrné rozprostření tlaku na kostní výčnělky. Kromě toho tento efekt pumpování masíruje svaly a zlepšuje tak krevní oběh. Tato antidekubitní matrace je skvělý nástroj proti tvorbě proleženin.

1. Přepněte hlavní vypínač (Power Switch) do polohy ON.
2. Ve směru hodinových ručiček otočte kolečkem pro ovládání tlaku do maximální polohy, avšak nepoužívejte přílišnou sílu, abyste ovládací kolečko nepřetočili. Toto nastavení maximálního tlaku zajistí během krátké doby plné nafouknutí matrace. Plné nafouknutí matrace trvá přibližně 15 – 20 minut.
3. Jakmile je matrace nafouknutá, nastavte hladinu tlaku na požadovanou úroveň.

### Ukončení používání matrace

1. Přepněte hlavní vypínač do polohy OFF.
2. Odpojte hadici ze vzduchové pumpy, čímž se umožní vypuštění vzduchu z matrace.

### Čištění

#### **Pumpa**

Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Čistým hadříkem namočeným v roztoku běžného domácího čisticího prostředku a vody otřete všechny dostupné plochy včetně napájecího kabelu a vzduchové hadice. Po očištění opakujte celý postup hadříkem namočeným pouze v čisté vodě a poté nechte všechny části řádně vyschnout.

### Upozornění

1. Použití izopropylalkoholu, rozpouštědel nebo jiných chemikálií může zničit pumpu. Jejich použití se vysoce nedoporučuje.
2. Před připojením napájecího kabelu do elektrické sítě se ujistěte, že je pumpa kompletně vysušená.

### Voděodolný obal matrace

Tento obal matrace může být prán ručně nebo v automatické pračce. Po vyčištění je třeba nechat obal důkladně uschnout.

### Matrace

Pro čištění vzduchových polštářů a základu matrace použijte mýdlo nebo běžný čisticí prostředek a vodu. Po vyčištění je třeba nechat všechny části důkladně uschnout.

### Upozornění

NEVAŘIT; CHEMICKY NEČISTIT; NEBĚLIT; NEPOUŽÍVAT ŽÁDNÉ CHEMIKÁLIE A AGRESIVNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY; NEŽEHLIT NEBO NEDEFORMOVAT.

### Uskladnění

Při uskladňování vaší antidekubitní matrace se řiďte následujícími pokyny:

1. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a sviňte jej.
2. Smotejte vzduchovou trubici, avšak neuzlujte ji.
3. Matraci přehněte, avšak pokud je matrace mokrá nebo vlhká, nechte ji nejprve vyschnout. Vyschnutí matrace před jejím uskladněním je velice důležité, jinak by mohlo dojít k tvorbě plísní.
4. Všechny části uložte na suchém místě, která nejsou vystavena příliš vysokým nebo naopak příliš nízkým teplotám.
5. Pokud chcete použít antidekubitní matraci po dlouhé době skladování, je doporučeno provést její kontrolu v odborném servisu.

### Údržba

Pro lepší efekt předcházení proleženin a pro příjemné používání je třeba provádět pravidelnou údržbu. Filtr a gumové těsnění v pumpě jsou vyměnitelné součástky, je tedy doporučeno tyto části pravidelně měnit.

### Řešení potíží

Pokud se objeví nějaký problém s pumpou, zkuste najít jeho řešení nejprve v následujících možných řešeních. Pokud se i poté nepodaří problém odstranit, obraťte se na autorizovaný servis.

**Upozornění:** Nikdy neotvírejte kryt vzduchové pumpy, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy přenechte na odborný servis. Naše firma nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé neautorizovanými opravami.


#### **Pumpa nepracuje i přesto, že je hlavní vypínač v poloze ON.**

1. Je napájecí kabel připojen do napájecí zásuvky na pumpě nebo do elektrické zásuvky?
  - Připojte napájecí kabel do napájecí nebo elektrické zásuvky.
2. Je elektrická zásuvka, do které je připojena pumpa, řízena vypínačem?
  - Pokud ano, přepněte tento vypínač do polohy „zapnuto“.
3. Není vypálená pojistka?
  - Pokud ano, vyměňte pojistku.
4. Není poškozená elektrická zásuvka, rozvod elektrické sítě, vyhořená pojistka nebo síťový jistič?
  - Pokud ano, vyměňte pojistku nebo jistič. Pokud dojde k opětovnému vyhoření pojistky, nechte zkontrolovat elektrické rozvody. Zkuste připojit vzduchovou pumpu do jiné elektrické zásuvky.
5. Není pumpa připojena do elektrické zásuvky dodávající špatné napětí?
  - Potřebné napětí je uvedeno v technických parametrech nebo na zadní straně pumpy. Napájecí napětí musí přesně odpovídat požadovaným hodnotám.
6. Není poškozen napájecí kabel?
  - Zkontrolujte napájecí kabel a případně se obraťte na odborný servis, který zajistí jeho výměnu.


#### **Pumpa funguje, ale matrace se nafukuje pomaleji než je obvyklé nebo nelze zcela nafouknout na požadovanou úroveň.**

1. Je ovladač tlaku nastaven na požadovaný tlak?
  - Nastavte ovladač tlaku stejně jak je popsáno v části „Popis ovládání“.
2. Je vzduchová hadice připojena k pumpě řádně? Neuniká okolo hadice vzduch?
  - Zkontrolujte a utáhněte všechna spojení.
3. Je trubice zkroucená, skřípnutá nebo ucpaná nějakým cizím předmětem?
  - Přenastavte hadici tak, abyste co nejvíce omezili záhyby a možné skřípnutí. V případě poškození je třeba hadici vyměnit.
4. Nejsou ve vzduchových polštářích nějaké trhliny?
  - Vraťte poškozené vzduchové polštáře do odborného servisu pro jejich opravu nebo případnou výměnu. Pokud je třeba, bude vyměněna celá matrace.
5. Neuniká vzduch někde uvnitř pumpy (neslyšíte z pumpy během nafukování matrace zvuk unikajícího vzduchu)?
  - Předejte pumpu na opravu do odbornému servisu.


## Výměna pojistky

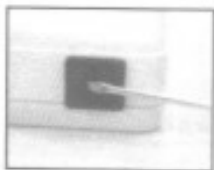

- 1.1 Pojistková skříňka je umístěna na boční straně pumpy vedle napájecí zásuvky.
- 1.2 Pro vyjmutí skříňky použijte šroubovák.

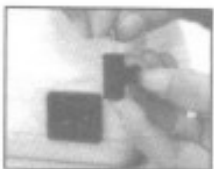

- 2 Vyměňte roztavenou pojistku za novou pojistku 0.5A.

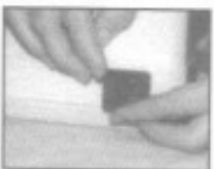

- 3 Vraťte pojistkovou skříňku zpět na její místo.

## Výměna vzduchového polštáře



1. Odejměte obě strany poškozeného vzduchového polštáře.

2. Odpojte poškozený vzduchový polštář a vzduchovou hadici.

3. Vytáhněte poškozený vzduchový polštář.



4. Vložte nový vzduchový polštář.

5. Propojte nový polštář se vzduchovou hadicí.

6. Připevněte obě strany polštáře.

## **Technické parametry**

### **Vzduchová pumpa**

- Rozměry: 27 x 14 x 8cm (d x š x v)
- Elektrické napětí: 230V / 50 Hz
- Hmotnost: 1,6kg (s hadicí)
- Výtlak vzduchu: 3,5-4 l/min
- Časový cyklus: 8 minut
- Hlasitost: 28dB

### **Matrace**

- Rozměry: 180 x 84 x 11cm (d x š x v)
- Hmotnost: 6kg
- Materiál: Nylon + PVC
- Max. užité zatížení: 120kg
- Počet vzduch. polštářů: 18



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

**Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno**

ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.

☎ 549 245 575; 602 766 759